



## Was ist schwieriger als Stumpfaufbauten?

*Ihre Kosten pro Einheitsdosis herauszufinden. Encore® DC MiniMix® ist der einzige Dualhärter, der in der Einzeldosis verkauft wird.*



### **Einzeldosis. Großartiger Preis. Probleme gelöst.**

Unser neues Encore D/C MiniMix-Kit als Einzeldosis enthält 36 Kartuschen. Jede Kartusche verfügt über ihre eigene Mischdüse und unsere exklusive Kanülenspitze. Unser Produkt ist dualhärtend, mit schneller Lichtaktivierung. Darüber hinaus reduziert die geringere Größe und die einfache Verwendung die Behandlungszeit und verringert den Stress beim Patienten.

- Zur vollständigen Aushärtung 40 Sekunden lichtaktivieren
- Die Kanülenspitze ermöglicht das Einbringen des Materials bis zum Boden eines Stiftlochs
- MiniMix-Technologie eliminiert praktisch jegliche Abfälle
- Standfeste Formulierung, keine Matrice erforderlich
- Lässt sich wie Dentin beschleifen, reduziert Rillenbildung
- Röntgenopak

Druckfestigkeit:	222 Mpa
Biegefestigkeit:	110 Mpa
Diametrale Zugfestigkeit:	48 Mpa
Lichtaktivierte Aushärtungstiefe:	2mm 20 Sekunden

**Bestellen ist einfach. Rufen Sie unter 0800 2368749 an oder kontaktieren Sie Ihren bevorzugten Händler. Besuchen Sie [centrixdental.de](http://centrixdental.de) für weitere Informationen.**

CE  
0510

**CENTRIX**  
**Encore® D/C**  
**MiniMix®**

Dualhärtendes-Stumpfaufbaumaterial  
in der Einheitsdosis



**centrix®**

Macht Zahnheilkunde einfacher.™

Dualhärtendes-Stumpfaufbaumaterial  
 in der Einheitsdosis

**ANLEITUNG IN 6 SCHRITTEN FÜR EINEN BLASENFREIEN,  
 KOMPOSIT-STIFT & STUMPFAUFBAU MIT ADHÄSIV**


**1)** Den Wurzelkanal für die Aufnahme des Encore D/C MiniMix erweitern. Die Ränder abschrägen, um spitze Winkel zu vermeiden.



**2)** Das Stiftloch ätzen, gründlich spülen und trocknen.



**3)** Das Adhäsiv gemäß den Herstelleranweisungen applizieren.



**4)** Die Kanülenspitze bis zum Boden des Wurzelstiftlochs einführen und das Material langsam und mit gleichmäßigem Druck einspritzen.



**5)** Das Auffüllen durch weiteres Einspritzen und langsames Zurückziehen der Kanüle fortsetzen.



**6)** Sofern gewünscht, Encore D/C lichtaktivieren, um das Abbinden zu beschleunigen. Das Material vollständig aushärten lassen und anschließend den Stumpf beschleifen und formen. Das Resultat ist ein massiver, fest haftender Stumpfaufbau mit Stiftverankerung.


**BESTELLINFORMATIONEN:**
**Encore D/C MiniMix**

Enthält: 36 Einzeldosis-Kartuschen (je 0,5 ml netto) und 36 Mischdüsen

Art. Nr. 310254 Farbe Natur, 36 St.



Art. Nr. 310255 Farbe Kontrastblau, 36 St.


**EMPFOHLENES ZUBEHÖR**

Art. Nr. 130651 Kurzkolben-Snap-Fit™ -Spritze


**Die Bestellung ist einfach.**

Rufen Sie uns  
 gebührenfrei an:  
**0800 CENTRIX**  
 (0800 2368749)

Oder kontaktieren Sie Ihren  
 bevorzugten Händler.

Besuchen Sie  
[centrixdental.de](http://centrixdental.de)  
 für weitere Informationen.


**centrix®**
*Macht Zahnheilkunde einfacher.™*