

CENTRIX GingiTrac™

Handfreies Gingivaretraktions-System



Das fadenlose Retraktionsverfahren, das Alles bietet. Garantiert.

Schlauer. Schneller. Und noch immer kein
Versäubern oder Fäden legen

GingiTrac wurde zu einer NEUEN 1:1 VPS-Formel weiterentwickelt. Leichtere Applikation mit der Automix-Pistole. Längere Haltbarkeit. Und schnelleres Aushärten.

Einfach weiterhin die Retraktionspaste mit unserem patentierten Mischdüsenaufsatz in den Sulkus einspritzen, mit einem GingiCap Bissdruck anwenden und wenige Minuten warten. Das in GingiTrac enthaltene Adstringens kontrolliert den Sekretfluss, während das fließfähige, silikonbasierte Material die Gingiva leicht andrückt.

Und da GingiTrac-Materialien silikonbasiert sind, lassen sie sich schnell und einfach entfernen. GingiTrac-Materialien gleiten sauber aus dem Sulkus ohne Trauma. Und Sie können Ihren anstehenden Abdruck durch Prüfen des GingiTracs während der Entfernung vorab ansehen.

- Einzelkronen- oder Mehrfachkronenretraktion ganz ohne Fadenlegen
- Funktioniert in weniger als 5 Minuten unabhängig von der Anzahl der Präps
- Genauere Abformungen
- Keine Hände im Mund
- Arbeitet schonend, keine Gewebetraumen oder Ligamentschäden
- Enthält ein Aluminiumsulfatadstringens zur Kontrolle von Blutung und Sekretfluss
- Einfach zu verwendende 1:1 (50 ml) Automix-Pistole mischt und gibt GingiTrac ab
- Lässt sich sauber an einem Stück entfernen, ohne Spülung



GingiTrac und GingiCap im
Retraktionseinsatz bei einer
Einzelpräparation



centrix®

Macht Zahnheilkunde einfacher.™

Die Bestellung ist einfach. Rufen Sie unter 0800 236 8749
an oder kontaktieren Sie Ihren bevorzugten Händler.
Besuchen Sie centrixdental.de für weitere Informationen.

Retraktionstechnik bei Einzelzähnen:



1) Wählen Sie eine GingiCap™ aus



2) Applizieren Sie GingiTrac in die mitgelieferte GingiCap sowie um die Präparation herum



3) Zubeißen lassen und warten



4) Bereit für die Abformung in weniger als 5 Minuten

BESTELL-INFORMATIONEN:

- | | |
|------------------------|---|
| Art. Nr. 360100 | GingiTrac-Nachfüllkit
2 GingiTrac-Kartuschen,
10 Mischdüsen und
10 Abgabespitzen |
| Art. Nr. 360103 | GingiCap Größe Regular -Nachfüllkit
40 GingiCaps Größe Regular,
40 Mischdüsen und
40 Abgabespitzen |
| Art. Nr. 360104 | GingiCap Größe Large - Nachfüllkit
40 GingiCaps Größe Regular,
40 Mischdüsen und
40 Abgabespitzen |
| Art. Nr. 360056 | GingiCap-Nachfüllpackung –
Kelche einzeln, 30 St. Größe
Regular, 30 St. Größe Large |
| Art. Nr. 360101 | GingiTrac Standard -
1 Mischpistole, 2 GingiTrac
Kartuschen, 40 Mischdüsen, 40
Abgabespitzen, 30 GingiCaps Größe Regular
und 30 GingiCaps Größe Large |
| Art. Nr. 360102 | GingiTrac Plus -
4 GingiTrac- Kartuschen, 80 Mischdüsen, 80 Abgabespitzen,
60 GingiCaps Gr. Regular und 60 GingiCaps Größe Large |



EMPFOHLENES ZUBEHÖR

ABDRUCKMATERIAL

Art. Nr. 360006 Access BLUE®

MISCHDÜSEN DS50-GingiTrac-Düsen,
Art. Nr. 910632 50 St. (Ansatz rosa)

MISCHDÜSENAUFSÄTZE
Art. Nr. 290017 144 St., Gr. 18, Gelb

DS50 1:1 AUTOMIX-SPRITZE
Art. Nr. 360036 1 Automix-Spritze

Bestellen ist einfach.

FON: 0800 centrix
(0800 2368749)

FAX: 0221 530978-22

MAIL: koeln@centrixdental.com
www.centrixdental.de

Oder kontaktieren Sie Ihren
bevorzugten Händler.



centrix®

Macht Zahnheilkunde einfacher.™